



الف) عنوان دستورالعمل: شستشوی دستی و پاک سازی ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیون

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
1	تحويل وسایل و ابزارهای غیر استریل از بخشها	واحد استریلیزاسیون
2	برداشت اقلام اضافی از ست های جراحی مانند (پنبه ، گاز ، کاور یکبار مصرف کف سینی ها و)	واحد استریلیزاسیون
3	غوطه ور کردن ابزارهای آلوده به مدت 10 دقیقه در آب سرد	واحد استریلیزاسیون
4	شستشو و پاک نمودن ابزارها از خون و ترشحات جراحی با استفاده از موادشوینده	واحد استریلیزاسیون
5	شستشو و پاک سازی ابزارها به وسیله برس غیر سیمی (برس کشی)	واحد استریلیزاسیون
6	پاک کردن وسایل و ابزارها از کف و مواد شوینده بصورت آب کشی بوسیله آب پرفشار	واحد استریلیزاسیون
7	وسایل تمیز را در محلول گندزدا غوطه ور می نماییم	واحد استریلیزاسیون
8		
9		
10		
11		

ج) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تهیه کننده: ربابه آبیلی نسب	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی رئیس مرکز
--------------------------------	--	---