



الف) عنوان دستورالعمل:

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شود .

ب) گامهای انجام کار:

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
۱	شماره زدن لیوان های ادراری و شماره زدن لوله ها به تعداد نمونه ها	پرسنل آزمایشگاه
۲	ریختن نمونه ادرار درون لوله ها و نوشتن اسم بیماران درون دفتر	پرسنل آزمایشگاه
۳	قرار دادن نوار ادراری داخل لوله و ثبت تغییر رنگ اندیکاتورهای روی نوار و گزارش آنها مثل Glucose, Blood, PH	پرسنل آزمایشگاه
۴	قرار دادن لوله های ادراری داخل سانتریفوز با دور هزار به مدت ۱۰ دقیقه	پرسنل آزمایشگاه
۵	خالی کردن لوله های ادراری و بررسی میکروسکوپی رسوب ادرار	پرسنل آزمایشگاه
۶	چک کردن قند ادرار با قند خون	پرسنل آزمایشگاه
۷	چک کردن پروتئین ادرار با اسید سولفوسالیسیک	پرسنل آزمایشگاه

پ) مشخصات عمومی دستورالعمل:

تدوین کننده:	تایید کننده:	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی
دکتر مرتضی خادم الحسینی مسئول فنی آزمایشگاه زهرا سبزه علی سوپروایزر آزمایشگاه	علی زارع عسکری مدیر مرکز	ریاست مرکز

تاریخ بازنگری: آبان ۹۵

ویرایش: دوم

کد دستورالعمل: ۱-۳-۴