



الف) عنوان دستورالعمل: نحوه باز خوانی ابزار و وسایل استریل شده از بخش ها

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
1	روی هر وسیله تاریخ استریل و انقضاء زده می شود	واحد استریلیزاسیون
2	تاریخ انقضاء وسایلی که با پارچه پک می شوند 15 روز و در صورتیکه که VP می شوند 3 ماه قابل استفاده می باشند	واحد استریلیزاسیون
3	هرگاه به هر نحوی ست استریل خیس یا کاغذ آن پاره شد اگر چه تاریخ انقضاء نگذشته باشد قابل استفاده نیست و باید دوباره استریل گردد	واحد استریلیزاسیون
4	اگر تاریخ انقضاء ستها بگذرد نباید از آن سی استفاده کرد مجدداً استریل می شود	واحد استریلیزاسیون
5	هرگاه به هر دلیلی اندیکاتور داخل ست به آن رنگ نشانگر نرسیده باشد از استفاده کردن ست خودداری می شود	واحد استریلیزاسیون
6	هرگاه اندیکاتور تست شاهد اتوکلاو تغییر رنگ نداد نباید از وسایل آن سیکل استفاده شود	واحد استریلیزاسیون
7	هرگاه تست بووی دیگ تغییر رنگ نداد باید وسایل مجدداً استریل گردند	واحد استریلیزاسیون
8	هرگاه تست اسپور تغییر رنگ داد نباید از وسایلی که استریل شده استفاده کرد باید وسایل برای استریل مجدد به واحد CSR فرستاده شود	واحد استریلیزاسیون
9	در صورت مثبت بودن رنگ هر یک از نشانگرها باید علت را جستجو و برای رفع نقص سریعاً اقدام کرد	واحد استریلیزاسیون
10		واحد استریلیزاسیون

ج) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تهیه کننده: ربابه آبیلی نسب	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی رئیس مرکز
--------------------------------	--	---

تاریخ بازنگری: آبان 95

ویرایش اول

کد دستورالعمل: 3-4-3