



الف) عنوان دستورالعمل: گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
1	محلول گندزدا وضد عفونی کننده را طبق دستورالعمل شرکت سازنده آماده میکنیم	واحد استریلیزاسیون
2	پس از شستشوی کامل ، ابزار و وسایل را به مدت 15 الی 30 دقیقه در مواد گندزدا رقیق شده غوطه ور می کنیم	واحد استریلیزاسیون
3	پس از زمان مورد نظر ابزارها و وسایل را از محلول خارج می نمایم	واحد استریلیزاسیون
4	آبکشی وسایل و ابزارها پس از گندزدایی با استفاده از آب پرفشار	واحد استریلیزاسیون
5	انجام تست پروتئین جهت حصول اطمینان از گندزدایی ابزارها و وسایل شسته شده	واحد استریلیزاسیون
6	در صورت مثبت بودن جواب تست روند شستشو و گندزدایی مجددا تکرار می گردد	واحد استریلیزاسیون
7	خشک کردن وسایل و ابزارها به وسیله هوای پرفشار و یا دستی	واحد استریلیزاسیون
8	در صورت منفی بودن جواب تست پروتئین وسایل به اتاق تمیز (اتاق پک) فرستاده می شوند	واحد استریلیزاسیون
9		
10		
11		

ج) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تهیه کننده: ربابه آبیلی نسب	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی رئیس مرکز
--------------------------------	--	---