



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

اعتباربخشی ملی بیمارستان

الف) عنوان روش اجرایی : نحوه رهگیری وسایل و تجهیزات استریل بکار رفته بیمار

ب) مراحل انجام کار در روش اجرایی :

1- وسایل و ابزارها پس از گندزدایی و شستشو توسط واحد استریلیزاسیون پگ می شوند

2- داخل وسایل پگ شده بستگی به تعداد اقلام موجود در آن تست کلاس 4 یا 6 توسط واحد استریلیزاسیون (اگر ست بیشتر از 5 قلم ابزار داشت تست کلاس 6 و کمتر از آن تست کلاس 4) گذاشته می شود

3- روی هر یک از تستهای شیمیایی (کلاس 4 و 6) کد، نام دستگاه و تاریخ استریل و انقضاء توسط واحد استریلیزاسیون نوشته می شود

4- هر ست استریل بستگی به نوع کار انجام شده برای یک بیمار توسط پرسنل بخشها (لیبر ، اتاق عمل ، اتاق قبل از عمل ، زنان 2 و مادران ونوزادان) استفاده می شود

5- تست داخل هر ست بکار رفته را برای بیمار در پرونده همان بیمار توسط پرسنل بخش نصب می گردد

6- جهت رهگیری، نام بیمار، کد وسیله استریل، شماره پرونده و مسئول ثبت کننده را در دفتری موجود در بخش یادداشت می شود.

7- یک تست به عنوان شاهد استریلیزاسیون در دفتر مستند سازی نتایج تست در بخش استریلیزاسیون ثبت می گردد

پ) مشخصات عمومی روش اجرایی:

تهیه کننده : ربابه آبیلی نسب	تایید کننده : علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی ریاست مرکز
---------------------------------	---	--

تاریخ بازنگری : آبان 95

ویرایش : اول

کد روش اجرایی: 3-4-4