



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: روش اجرایی استریل کردن اقلام حساس به حرارت	
کد سنجه: ب-5-1-3	کد: NH- DP-IPC-01-05
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

اداره بهبود کیفیت و اعتباربخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
1	روش اجرایی استریل کردن اقلام حساس به حرارت	2

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : روش اجرایی استریل کردن اقلام حساس به حرارت	
کد سنجه: ب-5-1-3	کد: NH- DP-IPC-01-05
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

بیانیه (سیاست بیمارستان) : بالابردن سطح ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دامنه: واحد استریلیزاسیون

منابع (مراجع): روش جاری بیمارستان

فرد پاسخگو : مسئول و پرسنل CSR و پرسنل اتاق عمل و لیبر و زایمان

نحوه نظارت بر اجرا: کنترل تست کلاس یک (لیبل) نصب بر روی وسایل

شیوه انجام کار در روش اجرایی :

1- ارسال درخواست اقلام حساس به حرارت از انبار مرکز به صورت ماهیانه

2- تحویل اقلام درخواستی از انبار دارویی

3- پرسنل CSR وسایل غیر برقی را شست و شو داده و وسایل غیر برقی را اسپری گندزدا زده و در انتها کاملاً خشک کرده و همچنین آمبوگ های بخش ها را نیز به صورت شسته شده و خشک شده تحویل می گیرند.

4- پگ کردن وسایل حساس به حرارت با استفاده از VP و نصب تست کلاس یک و تکمیل اطلاعات مربوطه به استریلیزاسیون مندرج بر روی تست توسط پرسنل واحد بخش استریلیزاسیون

5- انتقال وسایل پگ شده جهت استریلیزاسیون به مرکز حضرت علی ابن ابیطالب (ع) توسط پرسنل نقلیه مرکز (راننده آمبولانس)

6- استریل شدن وسایل با اتوکلاو گازی توسط پرسنل CSR حضرت بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)

7- برگشت پگ ها از مرکز علی ابن ابیطالب (ع) پس از مراحل استریل توسط راننده آمبولانس

8- ارسال بسته های استریل شده به بخش های مرکز متناسب با نیاز و درخواست آنها توسط نیروهای بخش استریلیزاسیون

تهدیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: روش اجرایی استریل کردن اقلام حساس به حرارت	
کد سنجه: ب-5-1-3	کد: NH- DP-IPC-01-05
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده	تهیه کننده
خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)