



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: خط مشی شستشوی دستی و پاک سازی ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیون	
کد: NH-PP-IPC-01-05	کد سنج: ب- ۵-۱-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۴	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۴

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱	خط مشی شستشوی دستی و پاک سازی ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیون	2-3

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR) (	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: خط مشی شستشوی دستی و پاک سازی ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیون	
کد: NH-PP-IPC-01-05	کد سنج: ب- ۵-۱-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۴	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۴

بیانیه خط مشی (سیاست بیمارستان): بالابردن سطح ایمنی بیمار و کنترل عفونت

دامنه خط مشی: پرسنل CSR

منابع (مراجع): روش جاری بیمارستان

فرد پاسخگو: پرسنل CSR

نحوه نظارت بر اجرای خط مشی: کنترل تست پروتئین بصورت پایلوت یک روز در میان

شیوه انجام کار:

۱. ابزار و وسایل آلوده توسط واحد استریلیزاسیون از بخشها تحویل گرفته می شود.
۲. اقلام اضافی مانند (گاز، پنبه و کاور یکبار مصرف کف سینی ها و.....) برداشته می شود.
۳. ابزار و وسایل به مدت ۱۰ دقیقه در آب سرد غوطه ور می شود.
۴. با استفاده از مواد شوینده ابزار و وسایل پاک سازی و شستشو می شود.
۵. جهت پاک سازی و شستشوی ابزار برس کشی (برس غیر سیمی) انجام می شود.
۶. جهت پاک کردن ابزار و وسایل از کف و مواد شوینده به وسیله آب پر فشار آب کشی انجام می شود.
۷. برای بررسی ابزار و وسایل توسط مسئول بخش تست پروتئین انجام می شود.
۸. ابزار و وسایل به مدت ۱۵ دقیقه در محلول گند زدا غوطه ور می شود.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : خط مشی شستشوی دستی و پاک سازی ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیون	
کد: NH-PP-IPC-01-05	کد سنجه: ب- ۵-۱-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۴	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۴

۹. بعد از خارج کردن ابزار از محلول گند زدا باید با آب پر فشار آب کشی شود

۱۰. خشک کردن ابزارها به وسیله هوای پرفشار انجام می شود.

۱۱. ارسال ابزارهای تمیز جهت پک به اتاق تمیز (پکینگ) انجام می شود.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR) (	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)