



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند	
کد: NH-In-EH-08-05	کد سنج: الف-۱۲-۴-۶
تاریخ تدوین: بهمن ماه ۱۴۰۱	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

ردیف	عنوان بخشنامه	شماره صفحه
۱	نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند	۲

دامنه کاربرد: مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

تعریف: دستگاه بی خطر ساز پسماند: دستگاهی است که جهت بی خطر سازی پسماندهای عفونی و نوک تیز و برنده استفاده می شود

دستورالعمل:

- ۱- مسئول شرکت باید نسبت به آموزش اپراتور دستگاه بی خطر ساز پسماند اقدام نماید.
- ۲- اپراتور و نماینده شرکت باید عملکرد دستگاه بی خطرساز را از نظر پایش مکانیکی که شامل مشاهده و بررسی نتایج ثبت شده مربوط به درجه ها و ثبات ها است روزانه چک کنند.
- ۳- اپراتور دستگاه باید عملکرد دستگاه بی خطر ساز را از نظر نفوذ بخار توسط اندیکاتور بووی دیک، روزانه در اولین سیکل دستگاه بررسی کند.
- ۴- اپراتور دستگاه باید در صورت مطلوب بودن نتیجه اندیکاتور بووی دیک، شروع به فعالیت بی خطر سازی کند و نتیجه را در دفتر ثبت کند.
- ۵- اپراتور دستگاه باید جهت اطمینان از عملکرد بی خطر سازی پسماندهای عفونی در هر سیکل از اندیکاتور کلاس ۶ استفاده کند

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای الهی فر (مدیر مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند	
کد: NH-In-EH-08-05	کد سنج: الف-۱۲-۴-۶
تاریخ تدوین: بهمن ماه ۱۴۰۱	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

و نتیجه را در دفتر ثبت نماید.

۶- نماینده شرکت باید در صورت مطلوب نبودن نتیجه تست اندیکاتورها نسبت به رفع نقص و خرابی دستگاه و اطلاع به واحد بهداشت محیط اقدام نماید.

۷- نماینده شرکت باید جهت اطمینان از عملکرد بیولوژیکی دستگاه و از بین بردن میکروارگانیسم ها به صورت هفتگی از اندیکاتور بیولوژیکی استفاده و نتیجه را به کارشناس بهداشت محیط بیمارستان ارائه نماید.

۸- آزمایشگاه معتمد محیط زیست باید جهت اطمینان از عملکرد بیولوژیکی دستگاه و از بین بردن میکروارگانیسم ها ماهیانه صحت عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند را بررسی و نتیجه را به بیمارستان اعلام کند.

۹- مسئول شرکت موظف به پاسخگویی و رفع عیب دستگاه های بی خطر ساز پسماند در صورت مطلوب نبودن نتیجه از طرف آزمایشگاه معتمد محیط زیست می باشد.

مسئول پاسخگوی دستورالعمل: مسئول بهداشت محیط

روش نظارت بر دستورالعمل: مشاهده و مستندات

امکانات و تسهیلات مورد نیاز: اندیکاتور شیمیایی و بیولوژیک و بووی دیک-دفاتر ثبت نتایج-پراتور دستگاه امحاء

پیوست (ضمائم): ندارد

منابع و مراجع: دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند، قانون مدیریت پسماند، ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه باتوته (کارشناس بهداشت محیط)	آقای الهی فر (مدیر مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)